

Anleitung
Armbandsender
R/5006.4



Stand: 04.03.2026

Inhalt

Lieferumfang	4
Senderaufbau	4
Batteriewechsel	5
Batterie entfernen	5
Batterie einsetzen	6
Gehäuse verschliessen	6
Bedienung	7
Einschalten	7
Ausschalten	7
Ruf Auslösen *	8
Notruf Auslösen *	8
Ruf Quittieren *	8
Zubehör & Ersatzteile	9
Kontakt	10

Lieferumfang

Der Sender wird inkl. Armband geliefert.



Senderaufbau

Der Sender hat folgende Schnittstellen für die Bedienung.



Batteriewechsel

Der Funksender verwendet Batterien vom Typ CR 2032.

Der Hersteller Gets SA empfiehlt die Verwendung von Batterien der Hersteller Panasonic oder GP-Batterien.

Damit ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet werden kann. Tauschen Sie die Batterie nach einem Jahr oder wenn die Batterie im System als leer gemeldet wird.

Batterie entfernen

Um die Batterie zu entfernen, lösen Sie auf der Rückseite die 4 Schrauben mit einem Torx 6 Schraubenzieher.

Anschliessend lässt sich das Gehäuse öffnen.

Der Print kann aus dem Deckel entfernt werden.



Wichtiger Hinweis


Auf dem Print befinden sich viele kleine Bauteile, die beschädigt werden können.

Nutzen Sie wenn nötig ausschliesslich nichtleitende (Kunststoff oder Holz) Werkzeuge, um die Batterie zu entfernen. Um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Nun können Sie die Batterie aus dem Batteriehalter entnehmen und durch eine neue Batterie ersetzen. Beachten Sie bitte dazu die nachfolgenden Hinweise.

Batterie einsetzen

Setzen Sie die Batterie so ein, dass der Pluspol zu Ihnen zeigt.

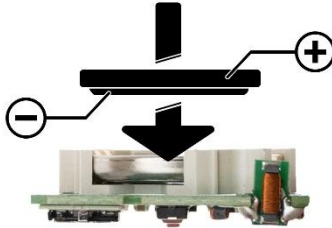

Gehäuse verschliessen

Um den Sender wieder zusammen zu bauen, setzen Sie als erstes den Print wieder in den Deckel des Gehäuses ein. Achten Sie dabei auf die Aussparung im Print, dieser muss genau zur Nase in der Membrane zeigen.



Wichtig

Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an. Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

Anschliessend kann die Rückseite wieder aufgesetzt werden und mit den vier Torx Schrauben verschlossen werden.

Bedienung

Punkte, die mit einem * gekennzeichnet sind, können ggf. abweichen, falls Sie eine Kundenspezifische Programmierung verwenden. Erkundigen Sie sich dafür bei Ihrem Technischen Dienst.

Einschalten

Um den Sender einzuschalten, drücken Sie die Taste insgesamt drei Mal kurz (innert 1 Sekunde). Dabei leuchtet die LED beim ersten Druck weiss auf. War dieser Vorgang erfolgreich blinkt die LED mehrmals violett auf.



Hinweis

Nach einem erfolglosen Versuch, hat der Sender eine Sperrzeit von ca. 20 Sekunden. In dieser Sperrzeit leuchtet die LED beim ersten Druck nicht weiss auf. Bitte warten Sie die Zeit vor einem erneuten Versuch ab.

Ausschalten

Um den Sender auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste gedrückt. Die LED beginnt rot zu blinken. Nach einiger Zeit leuchtet die LED konstant rot auf. Halten Sie jetzt den Magneten an die Magnetzone, während Sie die Taste immer noch gedrückt halten. Die LED leuchtet zuerst violett und anschliessend blau auf. Jetzt können Sie den Magneten entfernen, sowie die Taste wieder loslassen.



Hinweis

Beenden Sie vor dem Ausschalten alle Rufe des Senders. Da diese sonst weiter auf dem System anstehend bleiben.

Tipp

Um zu prüfen, ob der Sender erfolgreich ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste. Wenn die LED weiss aufleuchtet, ist der Sender ausgeschaltet.

Ruf Auslösen *

Um einen Ruf auszulösen, drücken Sie auf die Taste.



Wurde der Ruf erfolgreich übermittelt, blinkt die LED dreimal kurz grün auf.



Konnte der Ruf nicht erfolgreich übermittelt werden, so blinkt die LED dreimal rot auf. Der Sender wird in einem bestimmten Intervall erneut versuchen, den Ruf an das System zu übermitteln.

Notruf Auslösen *

Um einen Notruf auszulösen, drücken Sie die Taste dreimal schnell hintereinander.



Wurde der Ruf erfolgreich übermittelt, blinkt die LED dreimal kurz grün auf.



Konnte der Ruf nicht erfolgreich übermittelt werden, so blinkt die LED dreimal rot auf. Der Sender wird in einem bestimmten Intervall erneut versuchen, den Ruf an das System zu übermitteln.

Ruf Quittieren *

Um einen aktiven Ruf zu beenden, halten Sie den Magneten an die Magnetstelle. Jetzt leuchtet die LED blau auf, halten Sie den Magneten weiter an die Magnetstelle, bis das LED dreimal grün blinkt.



Konnte die Quittierung nicht erfolgreich übermittelt werden, so blinkt die LED dreimal rot auf anstatt grün. Der Sender wird in einem bestimmten Intervall erneut versuchen, die Quittierung an das System zu übermitteln.

Hinweis

Um einen Weglaufruf zu quittieren, verlassen Sie zuvor die Weglaufzone mit dem Sender, da dieser sonst gleich einen neuen Weglaufruf auslösen wird.

Zubehör & Ersatzteile

Folgendes Zubehör und Ersatzteile gibt es zu diesem Sender.



Magnet

zum Quittieren von Funksendern,
weiss, 16mm Durchmesser mit Öse zur
Befestigung am Schlüsselbund.

Art. **3002118**



Ersatzarmband

Uhrenarmband Silicon dünner in schwarz V2, 22mm x
220mm inkl. Stift Verriegelung, passend für
Arbandsender R/5006, R/5006.2 und R/5006.4.

Art. **3002655**



Schlaufe

Ersatzschlaufe passend zu Version 2 der schwarzen
Silikonarmbänder. Passend für Arbandsender.

Art. **3002657**



Ersatzgehäuse

Ersatzgehäuse passend zu Sender R/5006.4

[Artikelinformationen folgen.](#)



Batterie GP

CR2032, 3V 220mAh,
passend zu Gets Funksender.

Packung mit 20 Stück

Art. **3095129**

Sicherheitsarmband

Armband mit Magnetverschluss.

Der Magnetverschluss ist nur durch das Pflegepersonal mit einem Spezial-Magnetschlüssel zu öffnen.

Art. **3095156**

Magnetschlüssel

Zum Öffnen von Sicherheitsarmbänder mit Magnetverschluss.

Art. **3095147**

Kontakt

Bei Fragen zu diesem Gerät kontaktieren Sie gerne unseren Kundendienst.

Rufcom GmbH
Industrieweg 32
4852 Rothrist

E-Mail: info@rufcom.ch
Telefon: 062 752 85 15



Digitale Anleitung

www.rufcom.ch/anleitung/r50064



Rufcom GmbH
Industrieweg 32
4852 Rothrist

Web: www.rufcom.ch
E-Mail: info@rufcom.ch
Telefon: 062 752 85 15
24h-Pikett: 062 752 85 18 (kostenpflichtig)